


QuickSee **Guía de inicio rápido**

1

Alineamiento

Alinee el QuickSee con los ojos del paciente

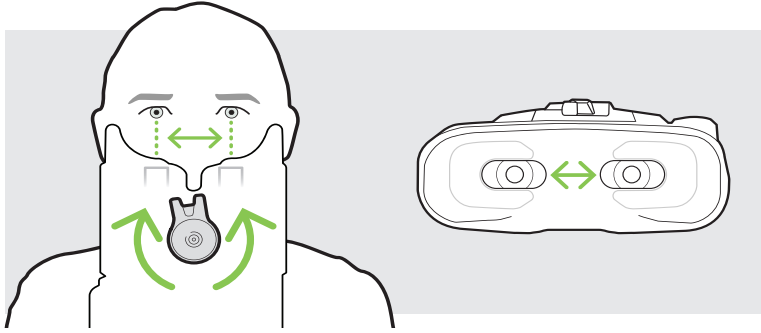

CONSEJOS PARA EL ALINEAMIENTO


- Si nota que los párpados están caídos u otras anomalías, considere la posibilidad de medir cada ojo individualmente para facilitar el proceso de alineamiento

GIRE EL DIAL para ajustar el visor a la **DP ESTIMADA** del paciente antes del paso 2

2

POSICIÓN

Coloque y sujete el QuickSee adecuadamente

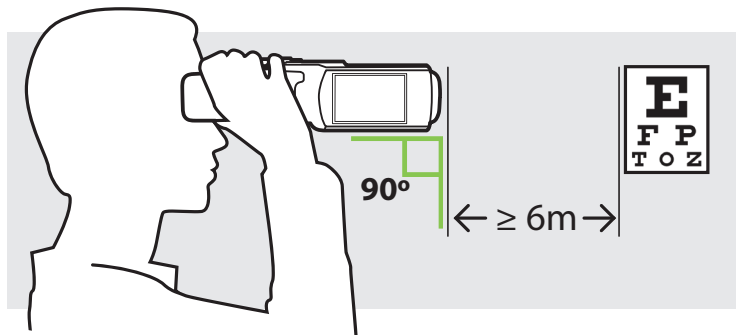

CONSEJOS PARA EL POSICIONAMIENTO

- Ponga el dispositivo a ras de la cara del paciente sin espacios
- Asegúrese de que el paciente no incline el dispositivo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha
- Indique al paciente que mire hacia algo lejano a través del dispositivo, algo con textura, estructura o brillante; evite que mire hacia una ventana o una pared vacía


COLOQUE el QuickSee en la **CARA** del paciente
Compruebe que el QuickSee está **NIVELADO** con respecto al suelo

Indique al paciente que **MIRE A TRAVÉS** de los orificios hacia un objetivo distante, **NO** al punto rojo interno

3

ELEGIR

El QuickSee puede medir el ojo izquierdo, el derecho o ambos

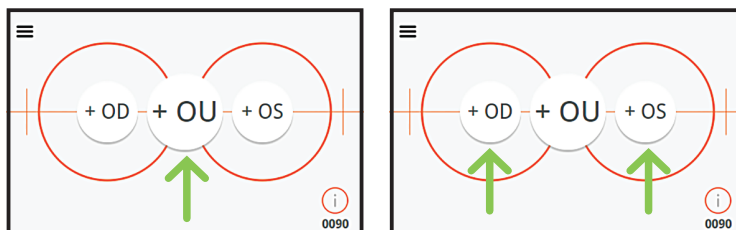

CONSEJOS PARA ELEGIR

- Si el paciente tiene los ojos desalineados, o es realmente difícil medir ambos ojos simultáneamente (esto puede suceder con los pacientes mayores), entonces trate de medir cada ojo individualmente


PRESIONE "OU" para medir ambos ojos simultáneamente u **"OD"/ "OS"** para medir uno a la vez

Guía de inicio rápido

4

AJUSTE


Centrar las pupilas del paciente en la zona de medición

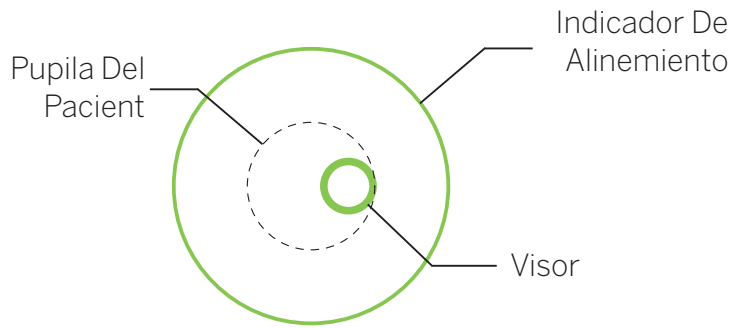

AJUSTE el dial/visor hasta que el **VISOR** esté situado dentro de la **PUPILA DEL PACIENTE** y el **INDICADOR DE ALINEAMIENTO** se ponga **VERDE**

CONSEJOS PARA EL AJUSTE


- El visor no tiene que estar perfectamente centrado sobre la pupila del paciente en la pantalla para tomar una medición; la mayoría de las veces con que esté dentro del centro producirá una medición precisa
- Si no puede ver el visor centrado en la pupila del paciente en la pantalla, compruebe primero que la DP es apropiada para su cara y luego desplace el dispositivo hacia arriba y hacia abajo verticalmente para intentar alinear el ojo (esto puede ocurrir cuando la nariz es más grande o más pequeña que la media)

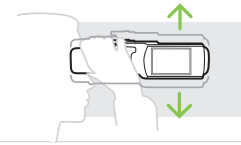

5

MEDICIÓN

Empiece la medición de uno o ambos ojos

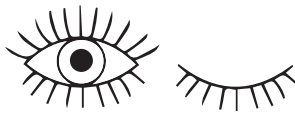

PRESIONE LA FLECHA VERDE para iniciar la medición de 10 segundos. Indique al paciente que **PARPADEE** mientras mira **LEJOS**


CONSEJOS PARA LA MEDICIÓN

- El temporizador de medición de 10 segundos aparecerá una vez que comience la medición
- Asegúrese de que el paciente parpadee al principio, a la mitad y hacia el final de la medición de 10 segundos
- - Si el paciente tiene los ojos desalineados, o es realmente difícil medir ambos ojos simultáneamente (esto puede suceder con pacientes ancianos), entonces trate de medir un ojo a cada vez

6

FINALIZACIÓN

Consulte las mediciones finales

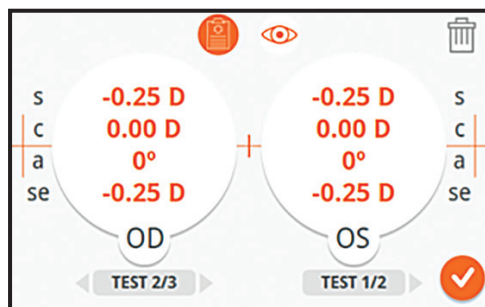

¡Observe la medición final de autorefracción!

s = valor esférico

c = valor de astigmatismo

a = eje de astigmatismo

se = equivalente esférico