

COVID-19 y QuickSee: Buenas prácticas

Recomendaciones de seguridad para reducir el riesgo de transmisión.

Recomendaciones de seguridad

- Limpie el QuickSee exhaustivamente entre cada uso.
- Asegúrese de que el operador y el paciente estén equipados con el equipo de protección personal (EPP) adecuado; las mascarillas respiratorias son compatibles con el QuickSee.
- Lávese bien las manos antes y después de la prueba.

Limpieza del QuickSee


- Se recomiendan soluciones alcohólicas (70% de etanol, isopropanol) y paños de microfibra; consulte la lista de sustancias activas y productos desinfectantes de la ECHA para encontrar otros desinfectantes eficaces contra el SARS-CoV-2.
- Retire el ocular para limpiarlo a fondo junto con los visores.
- No sumergir el QuickSee en líquido.
- Consulte la sección MANTENIMIENTO BÁSICO del Manual de Usuario del QuickSee para más información.

Evitar la condensación en los visores

Las mascarillas mal colocadas pueden causar que los visores se empañen. Para evitarlo, intente:


- Cerrar firmemente el clip de metal de la nariz en la mascarilla del paciente, si lo hay.
- Tirar de la mascarilla sobre el puente de la nariz del paciente para que el visor del QuickSee se apoye en ella y selle la mascarilla a su cara.
- Pedirle al paciente que respire por la boca durante el alineamiento y la medición.

Pre-alineamiento de la distancia

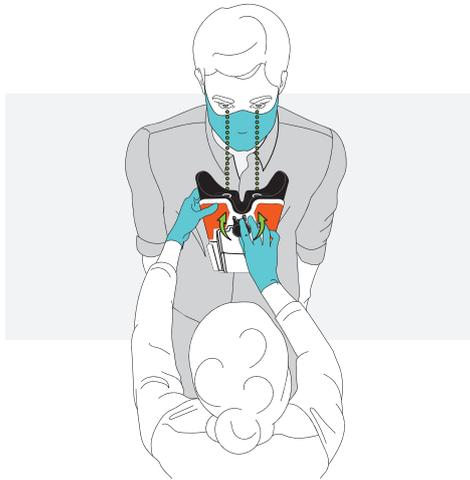


Pre-alinear la DP mientras se encuentra a una distancia segura del paciente (menos de 10 segundos). Es probable que subestime la DP, por lo que si la alineación no es inmediatamente correcta una vez que coloque el QuickSee en la cara del paciente, primero intente ensanchar la DP.

Manténgase a un lado

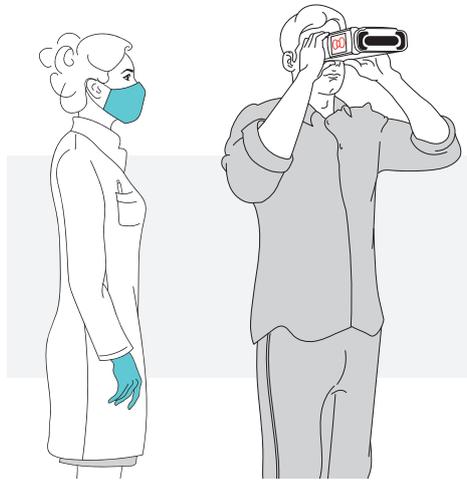

Utilice el QuickSee mientras permanece junto al hombro derecho del paciente, en lugar de directamente delante de él, reduciendo así la exposición directa a su respiración.

Utilícelo en cualquier lugar

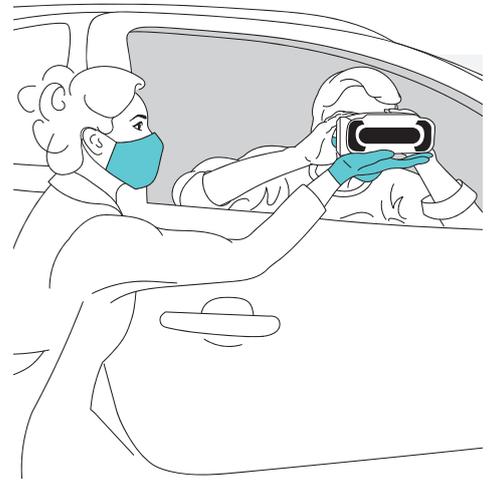

El QuickSee no es sensible a la luz ambiental, por lo que funciona tanto en interiores como en exteriores. Utilice el QuickSee mientras el paciente se encuentra en su coche o esperando fuera de la sala de examen.