

COVID-19 e QuickSee Buone prassi

Raccomandazioni di sicurezza per mitigare il rischio di trasmissione.

Raccomandazioni di sicurezza

- Lavare QuickSee a fondo dopo l'uso.
- Assicurare che l'operatore e il paziente sono equipaggiati con i dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI); le mascherine respiratorie sono compatibili con QuickSee.
- Lavare le mani a fondo prima e dopo il test.

Pulire il QuickSee


- Si raccomanda l'uso di soluzioni alcoliche (70% di etanolo, isopropanolo) e panni di microfibra; consultare la lista N della FDA per altri disinfettanti effettivi contro SARS-CoV-2.
- Ritirare l'occhiera e l'oculare per una pulizia completa.
- Non immergere il QuickSee in liquidi.
- Leggere la sezione di CURE DI BASE del manuale d'uso del QuickSee per ulteriori informazioni.

Evitare la condensa degli oculari

Le mascherine impropriamente posizionate possono creare condensa sugli oculari. Per prevenirlo, provare come di seguito:


- Chiudere fermamente il clip di metallo del naso della mascherina del paziente se possibile.
- Spingere la mascherina sul ponte del naso del paziente in modo che l'oculare del QuickSee rimanga su di esso e sigilli la mascherina sul viso.
- Chiedere al paziente di respirare attraverso la bocca durante l'allineamento e Mainla misurazione.

Distanza di preallineamento

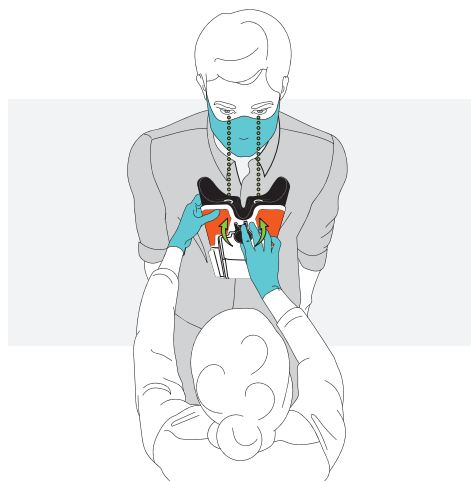


Pre-allineare il PD ad una distanza sicura dal paziente (meno di 10 secondi). Se l'allineamento non è immediatamente corretto nel momento in cui esso venga situato sul viso del paziente, tentare prima di allargare il PD.

Rimanere vicino

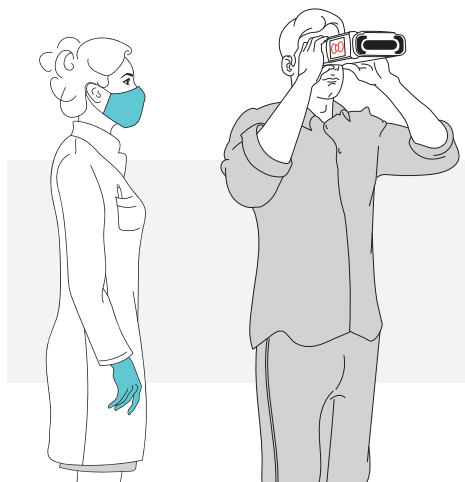

Usare il QuickSee vicino alla spalla destra del paziente, invece che davanti a lui, riducendo così l'esposizione reciproca al respiro.

Usare ovunque

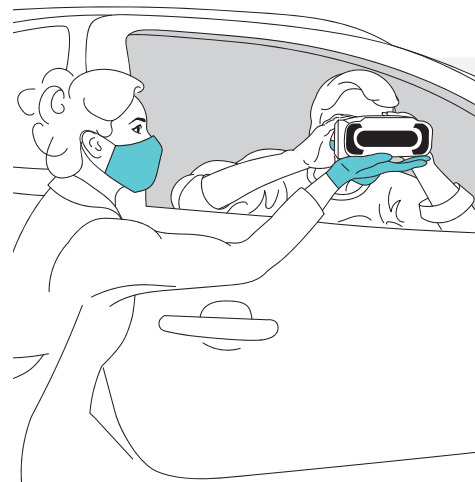

QuickSee non è sensibile alla luce d'ambiente, perciò funziona sia all'interno che all'esterno. Usare QuickSee quando il paziente si trova in macchina o aspetta fuori la sala di esami medici.